



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2017
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-17.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

*Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Stabilizator stawu skokowego wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją medyczną i konstrukcyjną

1	Stabilizator jest wykonany na staw skokowy prawej kończyny dolnej								
2	Wielkość i kształt stabilizatora są zgodne z szablonem								
3	W stabilizatorze znajduje się otwór pod piętę								
4	Część główna stabilizatora jest obszyta szwem obrzucającym								
5	Brzeg otworu pod piętę jest obszyty szwem brzegowym obrębającym albo szwem zygzak								
6	Części zapinające pasków stabilizujących /pętelka/ są przyszyte w miejscach – zgodnie z rysunkiem wykonawczym /6, 7/								
7	Zapięcia mocujące z taśmy typu Velcro /pętelka/ są przyszyte w miejscach – zgodnie z rysunkiem wykonawczym /2, 4/								
8	Części zapinające pasków stabilizujących są przyszyte do końców pasków haczykami do spodu								
9	Zapięcia mocujące dolne i górne są przyszyte do brzegów pokrycia haczykami do spodu /3, 5/								
10	Wyrób jest czysty								

Rezultat 2: Wypełniony formularz instruktażu eksploatacji i konserwacji stabilizatora						
1	We wskazówkach dotyczących zakładania zapisane: – postawić stopę na otwór przewidziany na piętę – zamknąć najpierw dolny, a następnie górny rzep mocujący pokrycie – zapiąć paski stabilizujące – pamiętać, żeby zapewnić dobre ukrwienie kończyny (nie zapinać zbyt ciasno) – zredukować kąt nachylenia stopy przy supinacji (odwracaniu na zewnątrz) – najpierw zewnętrzny (boczny) pasek stabilizujący przełożyć w kierunku od zewnątrz do wewnątrz przez tył pięty (podbicie) a następnie pod lekkim napięciem zapiąć na rzep w okolicy kostki przysródkowej – następnie przełożyć wewnętrzny (przysródkowy) pasek stabilizujący przez tył pięty w kierunku kostki bocznej i zapiąć rzep – redukcja supinacji jest tym większa, im mocniej jest napięty zewnętrzny pasek stabilizujący <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów</i>					
2	We wskazówkach dotyczących konserwacji zapisane: – prac w temperaturze 30÷40°C – prac ręcznie w delikatnym środku piorącym (np. płatkach mydlanych) – płukać wielokrotnie – odwirowywać na niskich obrotach – suszyć w temperaturze pokojowej z dala od grzejników i intensywnych źródeł ciepła – suszyć w stanie rozłożonym – dokonywać czyszczenia przynajmniej raz w miesiącu <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów.</i>					
3	We wskazówkach dotyczących konserwacji zapisane: nie wolno – prasować – prac na sucho – czyścić chemicznie – chlorować – stosować płynów zmiękczających – dopuścić do silnego zabrudzenia – wystawiać na działanie promieni słonecznych <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów</i>					

4	We wskazówkach dotyczących eksploatacji zapisane:								
	– przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej								
	– dokonywać przeglądów (stan obszyć)								
	– nie należy wkładać waty ani innych improwizujących wyściółek do wnętrza stabilizatora								
	– zwracać uwagę na poprawność zakładania								
	– nie stosować stabilizatora po uprzednim stosowaniu żeli lub maści rozgrzewających								
	– stabilizator stosować na umytą kończynę, zwłaszcza w przypadku zwiększonej potliwości								
	– nie stosować na uszkodzoną lub chorobowo zmienioną skórę								
	Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów								
	Przebieg 1: Przebieg wykonania rozkroju materiałów oraz szycia stabilizatora zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy								
1	wykonał rozkrój materiału zgodnie z załączonym szablonem								
2	wykonał rozkrój materiału na stole krojącym								
3	wykonał dobrze trzymające, mocne szwy								
4	przyszył taśmę gumową do stabilizatora w miejscu łączenia brzegów stabilizatora pod stopę								
5	wykonał szew wsteczny wzmacniający na początku i końcu każdego przeszycia								
6	odłączył maszynę do szycia od gniazdka elektrycznego po zakończonej pracy								
7	używał napałka w czasie szycia ręcznego								
8	nie przytrzymywał szpilek w ustach								
9	nie szył z podniesioną stopką								
10	nie uruchamiał maszyny przed umieszczeniem tkaniny pod stopką								


Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

1. część główna stabilizatora – pokrycie
2. zapięcie mocujące dolne pętelka
3. zapięcie mocujące dolne haczyk
4. zapięcie mocujące górne pętelka
5. zapięcie mocujące górne haczyk
6. część zapinająca paska stabilizującego zewnętrznego pętelka
7. część zapinająca paska stabilizującego wewnętrznego pętelka

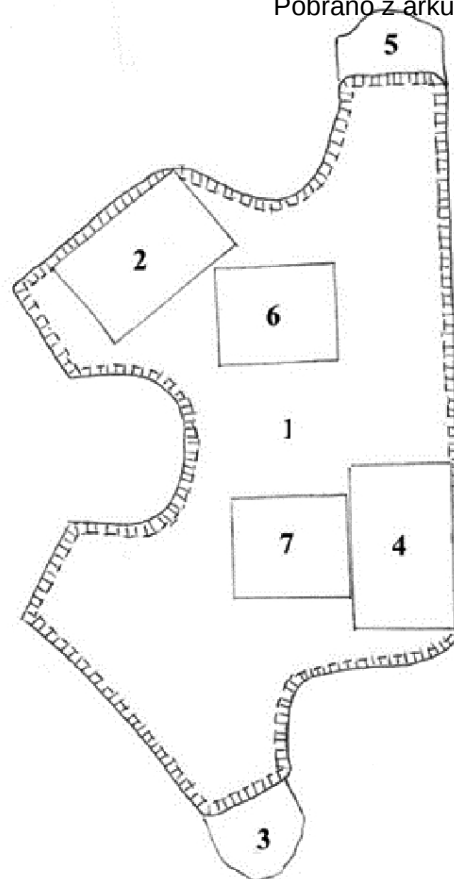

rys. 1 Stabilizator w rozłożeniu - wierzch

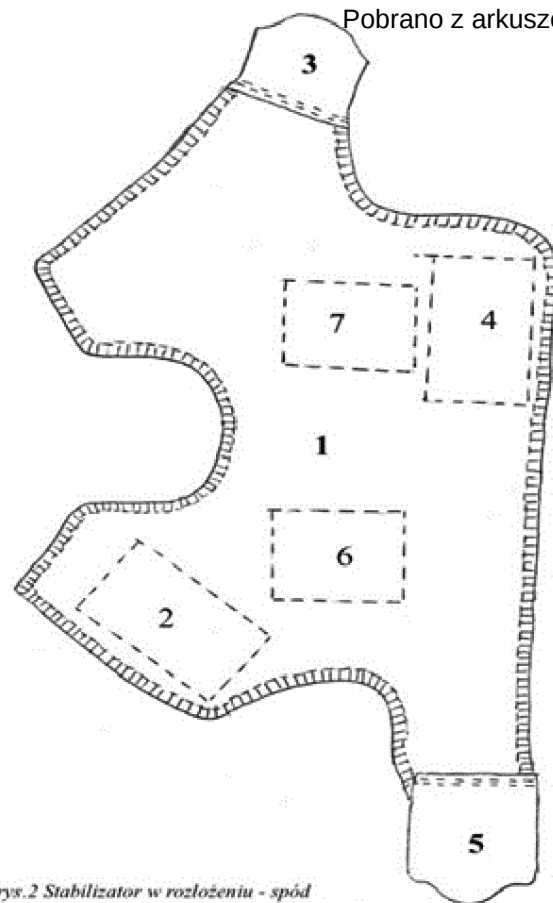

rys.2 Stabilizator w rozłożeniu - spód

1. część główna stabilizatora – pokrycie
2. szwy zapięcia mocującego dolnego pętela
3. zapięcie mocujące dolne haczyk
4. szwy zapięcia mocującego górnego pętela
5. zapięcie mocujące górne haczyk
6. szwy części zapinającej paska stabilizującego zewnętrznego pętela
7. szwy części zapinającej paska stabilizującego wewnętrznego pętela